

Prérequis :

- Savoir télécharger des fichiers dans un dossier de votre choix
- Savoir décompresser des archives dans un dossier de votre choix et non en exécuter le contenu depuis l'archive
- Savoir si Windows est en version 32 bits ou 64 bits



Si vous n'avez pas compris ces prérequis, veuillez contacter Framiral qui peut vous proposer une installation à distance.

Instructions :

- Veuillez ne rien brancher à l'ordinateur avant d'effectuer l'installation.
- Dans le tableau de la page suivante sont listées les différentes étapes d'installation. Il est indiqué, pour chaque logiciel, si une étape doit être appliquée ou non.
- Pour connaître les logiciels que vous devez installer, veuillez consulter votre Bon de Livraison ou votre Facture.
- Si une même étape devrait être effectuée plus d'une fois, n'effectuez cette étape qu'une seule fois.
- Si une étape vous demande d'installer un logiciel que vous avez déjà installé par le passé, vous devez quand même effectuer cette installation pour mettre à jour le logiciel.
- Les étapes doivent être suivies dans l'ordre.
- Les instructions des étapes doivent être suivies dans l'ordre.
- Le site de téléchargement Framiral est accessible à l'adresse suivante :
 - <https://framiral.fr/web/telechargements/>
- La première fois que vous allez télécharger un logiciel à partir de cette page, un login et un mot de passe vous seront demandés :
 - Login : soft
 - Mot de passe : fram08
- Après l'installation des logiciels, lire les manuels d'utilisation pour configurer ces logiciels.
 - Vous téléchargerez ces manuels lors des étapes 1 et/ou 8.

	Frami-AVD	Frami-Fauteuil	FramiGest	FramVideo	Multitest-BC	Frami-VNG	Frami-VS	Frami-Cible	Frami-Opt	Frami-Eyexplor	Frami-3D	
Etape 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	Installation de FramiGest
Etape 2	✓									✓		Installation du pilote du capteur de mouvement et de VC++ 2012
Etape 3				✓		✓				✓		Installation du pilote de la carte d'acquisition vidéo
Etape 4				✓						✓		Installation et Configuration du codec vidéo
Etape 5		✓			✓		✓					Installation du pilote du convertisseur Série<->USB
Etape 6					✓							Installation de l'Optocinétique
Etape 7					✓						✓	Installation des Feedbacks
Etape 8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Installations des logiciels correspondants
Etape 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Demande de clé
Etape 10	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Transfert optionnel des patients

Détails de l'Etape 1 :

- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page *FramiGest*
- Télécharger le manuel d'utilisation
- Télécharger l'installateur de FramiGest
- Exécuter l'installateur de FramiGest
- Si les patients doivent être partagés entre plusieurs ordinateurs d'un même réseau :
 - Télécharger le manuel d'installation Serveur
 - Suivre les instructions du manuel d'installation Serveur
 - Des téléchargements supplémentaires seront demandés dans ce manuel
- Lire le manuel d'utilisation afin de pouvoir lancer et utiliser FramiGest

Détails de l'Etape 2 :

- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page *Pilotes Capteur de Mouvement*
- Télécharger l'installateur des pilotes
- Exécuter l'installateur et lorsque cela vous sera proposé, ne cocher que 'Common files'
- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page *VC++_2012*
- Télécharger les deux installateurs de VC++ 2012
- Selon votre version de Windows :
 - 32 bits : n'installer que la version 32 bits
 - 64 bits : installer les deux versions

Détails de l'Etape 3 :

- Si le boîtier d'acquisition vidéo qui va être utilisé pour des logiciels Framiral n'a pas été vendu par Framiral ou n'est pas de marque AverMedia, contacter Framiral
- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page *Pilotes carte d'acquisition Vidéo*
- Télécharger l'installateur des pilotes
- Exécuter l'installateur

Détails de l'étape 4 :

- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page *CODEC*
- Télécharger l'installeur du codec vidéo
- Exécuter l'installeur
- Configurer le codec vidéo :
 - Menu démarrer
 - Tous les programmes
 - Xvid
 - Encoder Config
 - Other Options...
 - Décocher « Display encoding status », et cliquer sur les boutons « Ok » pour valider.
- Si votre ordinateur a un processeur moins puissant que celui recommandé par Framiral :
 - Ouvrir le « Menu démarrer »
 - Cliquer sur « Xvid » dans la liste des programmes
 - Cliquer sur « Encoder Config »
 - Cliquer sur la liste déroulante à côté de la mention « Quality Preset »
 - Sélectionner « Real-time »
 - Cliquer sur le « Ok » pour valider

Détails de l'étape 5 :

- Si l'ordinateur possède déjà d'autres convertisseurs Série<->USB que celui vendu par Framiral, contacter Framiral
- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page *Pilotes convertisseur Série<=>USB*
- Télécharger les installeurs des pilotes
- Exécuter les installeurs

Détails de l'étape 6 :

- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre sur la page *Optocinétique*
- Télécharger l'installeur de l'Optocinétique
- Exécuter l'installeur

Détails de l'étape 7 :


- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre sur la page *Feedbacks*
- Télécharger les installeurs des Feedbacks
- Exécuter les installeurs

Détails de l'Etape 8 :

- Pour chaque logiciel Framiral
 - Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page du logiciel à installer
 - Télécharger le(s) manuel(s) d'utilisation
 - Télécharger l'installateur du logiciel
 - Si l'installateur est une archive
 - Décompresser l'archive dans un dossier à conserver
 - Exécuter le *setup.exe*
 - Ne pas supprimer ni déplacer cet installateur
 - Sinon exécuter l'installateur du logiciel
 - Lire le manuel d'utilisation afin de pouvoir lancer et utiliser le logiciel

Détails de l'Etape 9 :

- Sur le site de téléchargement Framiral, se rendre dans la page Demande de clé
- Télécharger le manuel de demande de clé
- Suivre le manuel de demande de clé
- Télécharger l'installateur du logiciel

- Login à utiliser : 

- Les clés seront récupérées par les logiciels automatiquement sous une semaine (à condition d'avoir fait la demande de clé correctement)
- Si au bout d'une semaine les clés ne sont toujours pas disponibles, contacter Framiral

Détails de l'Etape 10 :

Cette étape est optionnelle : Elle permet de récupérer les patients de l'ancien PC en cas de déplacement des logiciels entre deux PC.

- Copier le dossier 'FramiralData\Patients' depuis l'ancien PC vers le nouveau PC
 - Ce dossier se trouve par défaut dans 'C:\'
- Lancer FramiGest
- Cliquer sur le menu « Options »
- Cliquer sur le sous-menu « Synchronisation de la base de données »
- Attendre la fin de l'import