

Prérequis :

- Savoir télécharger des fichiers dans un dossier de votre choix
- Savoir décompresser des archives dans un dossier de votre choix et non en exécuter le contenu depuis l'archive
- Savoir si Windows est en version 32 bits ou 64 bits



Si vous n'avez pas compris ces prérequis, veuillez contacter Framiral qui peut vous proposer une installation à distance.

Instructions :

- Veuillez ne rien brancher à l'ordinateur avant d'effectuer l'installation.
- Pour connaître les logiciels que vous devez installer, veuillez consulter votre Bon de Livraison ou votre Facture.
- Si une étape vous demande d'installer un logiciel que vous avez déjà installé par le passé, vous devez quand même effectuer cette installation pour mettre à jour le logiciel.
- Les étapes doivent être suivies dans l'ordre.
- Les instructions des étapes doivent être suivies dans l'ordre.
- Le site de téléchargement Framiral est accessible à l'adresse suivante :
 - <https://framiral.fr/web/telechargements/>
- La première fois que vous allez télécharger quelque chose à partir de cette page, un login et un mot de passe vous seront demandés :
 - Login : soft
 - Mot de passe : fram08
- Après l'installation des logiciels, lire les manuels d'utilisation pour configurer ces logiciels.
 - Vous téléchargerez ces manuels lors de l'étape 1.

Étape 1 :

- Sur le site de téléchargement Framiral, cochez tous les logiciels à installer
 - Si le logiciel à installer ne se trouve pas dans la liste, arrêtez-vous et contactez Framiral
- Téléchargez tous les logiciels, pilotes et documents proposés
- Installez tous les logiciels et pilotes ainsi téléchargés
- Les documents ainsi téléchargés incluent les manuels d'utilisation des logiciels

Étape 2 (Optionnelle) :

Si les patients doivent être partagés entre plusieurs ordinateurs d'un même réseau.


- Cochez LEGACY
- Téléchargez le Manuel d'installation SQL SERVER
- Suivez les instructions du manuel ainsi téléchargé

Étape 3 (Optionnelle) :

Si l'installateur Installateur-Xvid-1.3.7.exe a été téléchargé et installé.

- Configurez le codec vidéo :
 - Menu démarrer
 - Tous les programmes
 - Xvid
 - Encoder Config
 - Cliquez sur la liste déroulante à côté de la mention « Quality Preset »
 - Sélectionnez « Real-time »
 - Other Options...
 - Décochez « Display encoding status », et cliquer sur les boutons « Ok » pour valider.

Étape 4 :

- Suivre le manuel de Demande de clef téléchargé durant l'étape 1
- Login à utiliser : 
- Les clés seront récupérées par les logiciels automatiquement sous une semaine (à condition d'avoir fait la demande de clé correctement)
- Si au bout d'une semaine les clés ne sont toujours pas disponibles, contacter Framiral

Détails de l'Étape 5 (Optionnelle) :

Cette étape permet de récupérer les patients de l'ancien PC en cas de déplacement des logiciels entre deux PC.

- Copier le dossier 'FramiralData\Patients' depuis l'ancien PC vers le nouveau PC
 - Ce dossier se trouve par défaut dans 'C:\'
- Lancer FramiGest
- Cliquer sur le menu « Options »
- Cliquer sur le sous-menu « Synchronisation de la base de données »
- Attendre la fin de l'import