


MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL FRAMICIBLE

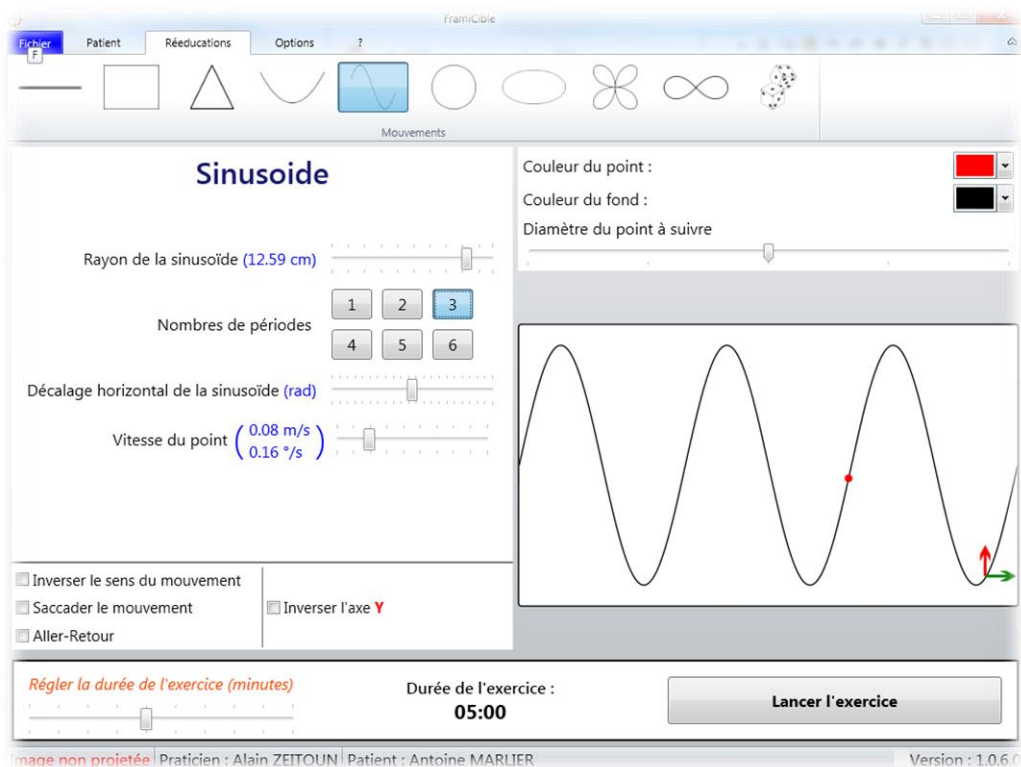

Version
002

Applicable au logiciel FramiCible 1.0.8 et supérieur

Ce document présente les fonctionnalités et méthodes d'utilisation du logiciel d'exercices de coordination tête/œil vidéo-projeté développé par FRAMIRAL : FramiCible.

Table des matières

INTRODUCTION	3
1. INSTALLATION ET CONFIGURATION	4
1. Installation du logiciel.....	4
2. Configuration du logiciel.....	4
a) Accès aux paramètres	5
b) Général	5
c) Projecteur	5
d) Calibration	7
e) Exercice.....	8
e) Réseau.....	8
f) Clé de licence	9
3. UTILISATION DU LOGICIEL.....	10
1. Lancement du logiciel.....	10
2. Utilisation.....	10
a) Onglet patient.....	10
b) Nouvel exercice.....	12
2. Autre	13
IV. MISE A JOUR.....	14
1. Rechercher et installer des mises à jour.....	14
a) Cas 1 : Votre logiciel est à jour	14
b) Cas 2 : Des mises à jour sont disponibles.....	14
c) Cas 3 : Il est impossible de chercher les mises à jour.....	15

INTRODUCTION

La société FRAMIRAL développe depuis des années ses propres logiciels de pilotage des différents matériels médicaux qu'elle conçoit (Multitest Equilibre, Vertical Subjective, Framiscope, Fauteuil Rotatoire). Dans le souci de faciliter la séance du praticien, et de proposer de multiples fonctionnalités, FRAMIRAL a conçu le logiciel FramiCible.

Ce logiciel intuitif et convivial, vous permet de projeter une tache mouvante via un vidéoprojecteur adapté, et de contrôler son mouvement et aspect via ordinateur afin de faire effectuer à votre patient (éventuellement équipé du HeadPointer) des exercices de coordination tête/œil.

Par ailleurs, il peut fonctionner via le logiciel de gestion de patients FRAMIGEST, qui centralise les données de tous les logiciels FRAMIRAL, et permet ainsi une meilleure traçabilité.

1. INSTALLATION ET CONFIGURATION

1. Installation du logiciel.

Cliquez sur le fichier « setup.exe », et suivez les instructions.

Cela revient en général à cliquer quatre fois sur « Suivant » et une fois sur « Terminer ».

2. Configuration du logiciel.

Lancez le logiciel FramiCible en cliquant sur l'icône FramiCible dans FramiGest.



FIGURE 1 - ICONE FRAMICIBLE DANS FRAMIGEST

Ou lancez-le directement via l'icône présente sur le bureau.



FIGURE 2 - ICONE FRAMICIBLE SUR LE BUREAU

Le programme peut vous ouvrir une fenêtre d'erreur indiquant que la clé de licence n'est pas définie, et/ou que c'est votre première utilisation.

a) Accès aux paramètres

Une fois le logiciel FramiCible ouvert, dans la barre de menu, cliquez sur le menu « Options » (voir Figure 3, cadre rouge).

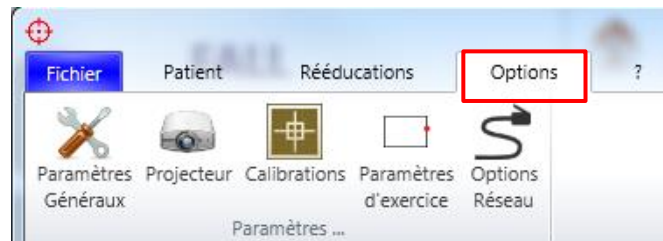


FIGURE 3 - PARAMETRES

Cliquez sur l'une des icônes afin d'accéder à la fenêtre de paramètres, dans l'onglet correspondant.

b) Général

Vous pouvez changer la langue du logiciel. Il est nécessaire de redémarrer le logiciel pour appliquer les changements.

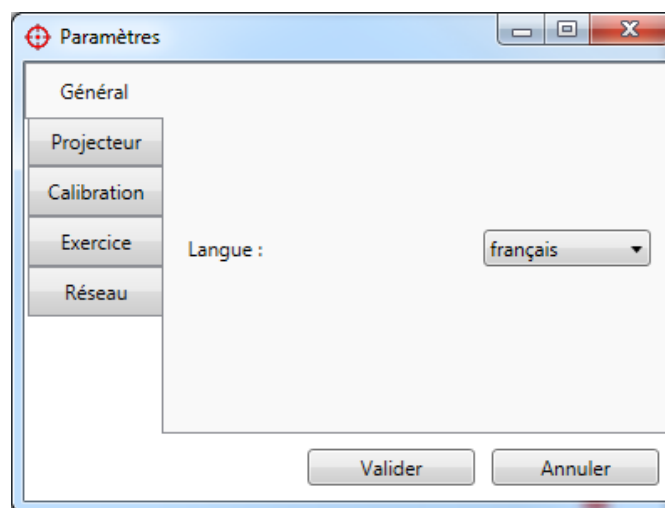


FIGURE 4 - GENERAL

c) Projecteur

Sélectionnez le numéro de l'écran sur lequel projeter (cas d'un bureau étendu via Windows), et indiquez la distance entre le mur et le patient, afin de pouvoir corrélérer les vitesses angulaires.

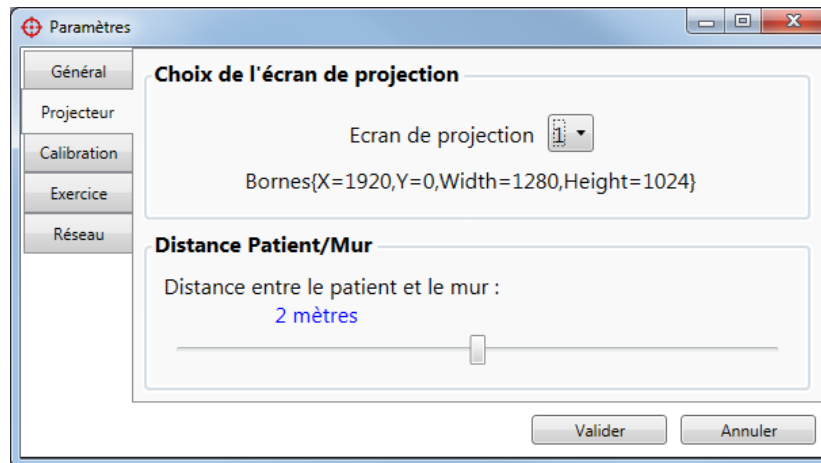


FIGURE 5 - PROJECTEUR

d) Calibration

Cette étape permet de connaître le DPI de votre écran de projection. Cliquez sur « Calibrer les pixels de l'écran » et suivez les instructions de la fenêtre « E » qui apparaît en bas à gauche de votre écran (celui sélectionné précédemment).

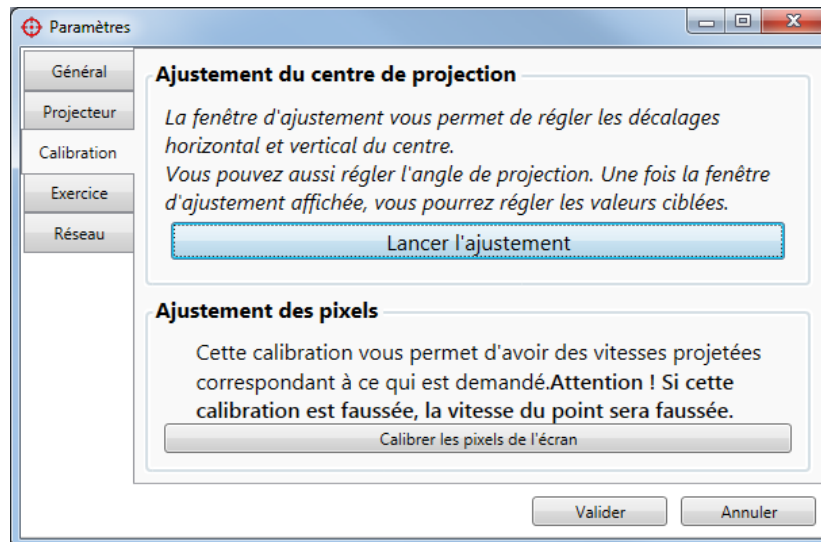


FIGURE 6 - CALIBRATION

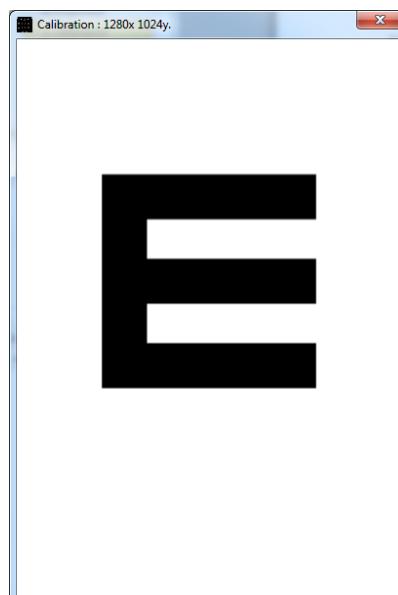


FIGURE 7 - FENETRE "E"

e) Exercice

Définissez ici la configuration par défaut du temps d'un exercice, et la fréquence des saccades lorsque l'option est activée.

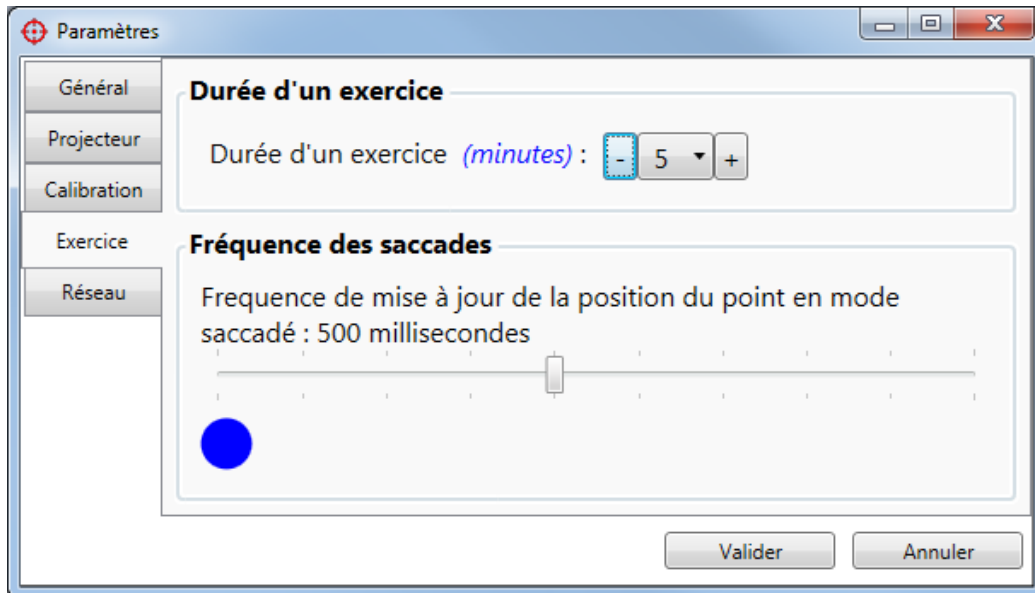


FIGURE 8 - CONFIGURATION D'EXERCICE

e) Réseau

L'option communication Internet doit être activée par défaut. Elle permet la mise à jour automatique du logiciel, et l'envoi de rapport de bugs. Vous pouvez la désactiver si vous le désirez.

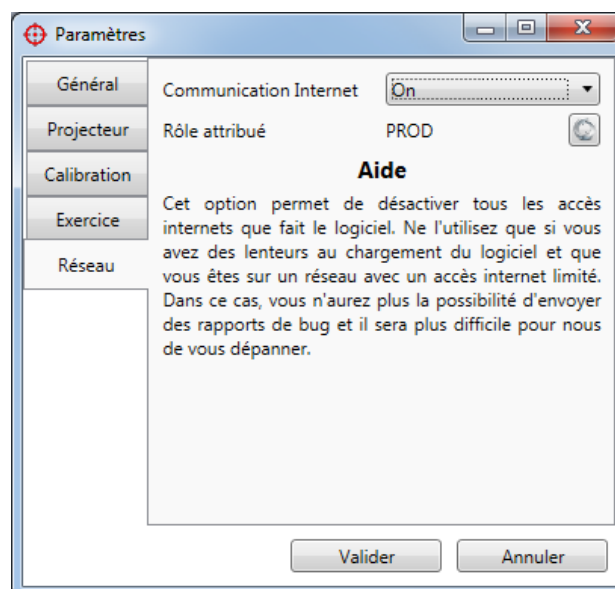


FIGURE 9 - RESEAU

f) Clé de licence

Pour entrer la clé de licence, aller dans le menu « ? » et choisissez le sous-menu « Licence... ». Le sous-menu « Licence... » vous permet de saisir la clé de licence qui vous autorise à utiliser le logiciel pour une durée limitée. Cette clé de licence vous est fournie par Framiral lorsque nous installons les logiciels nous-même ou après une demande de votre part. Dans le cas où vous avez Internet, pour faire une demande cliquez simplement sur le bouton « Faire une demande ». Ensuite, soit nous vous communiquerons votre clé de licence par mail, sinon chaque jour cliquez sur le bouton « Vérifier si une clé est disponible » pour la récupérer automatiquement (voir Figure 11).

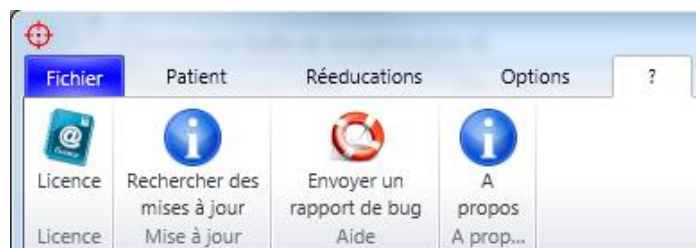


FIGURE 10 - MENU "?"

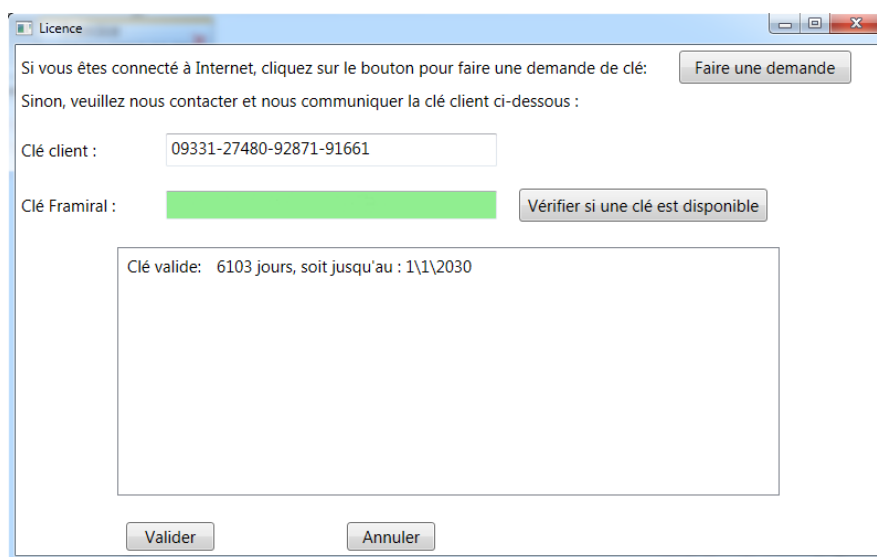


FIGURE 11 - CLE DE LICENCE

3. UTILISATION DU LOGICIEL

1. Lancement du logiciel

Lancez le logiciel grâce à l'icône FramiCible intégrée dans FramiGest.

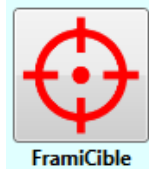


FIGURE 12 - ICONE FRAMICIBLE SOUS FRAMIGEST

Ou lancez-le directement via l'icône présente sur le bureau.



FIGURE 13 - ICONE FRAMICIBLE SUR LE BUREAU

2. Utilisation

a) Onglet patient

Lorsque vous lancez le logiciel via FramiGest, les exercices effectués avec un patient sont automatiquement sauvés. Le logiciel s'ouvre alors sur l'onglet « Patient », et vous affiche l'historique de ses séances de FramiCible.

Si le logiciel est lancé via le Bureau Windows, l'onglet de suivi de patient n'existe donc pas.

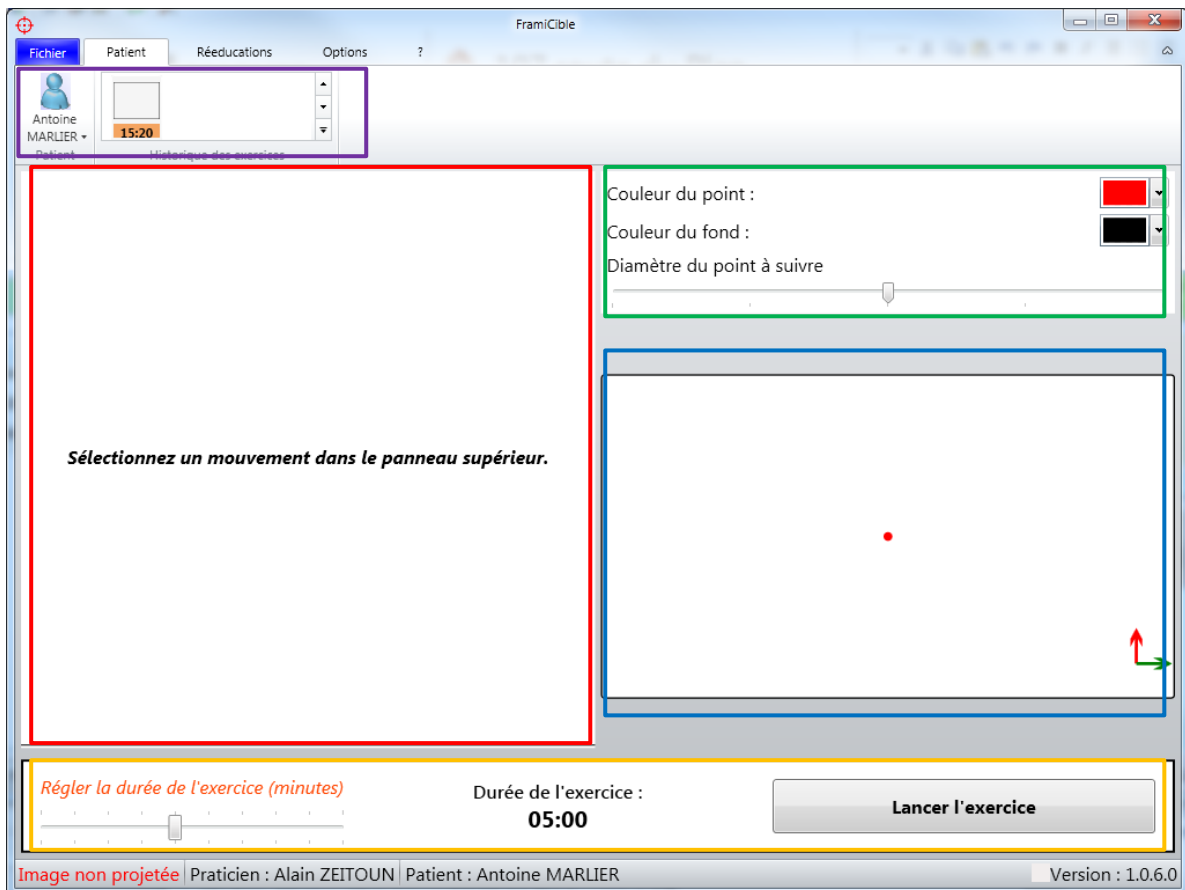


FIGURE 14 – FRAMICIBLE – ONGLET PATIENT

- Onglet patient – historique des séances (cadre violet)
- Paramétrage spécifique de l'exercice (cadre rouge)
- Interface commune de paramétrage (cadre vert)
- Prévisualisation de l'exercice (cadre bleu)
- Lancement de l'exercice (cadre orange)

Cliquez sur un historique d'exercice afin de le reproduire à l'identique (cadre violet).

b) Nouvel exercice

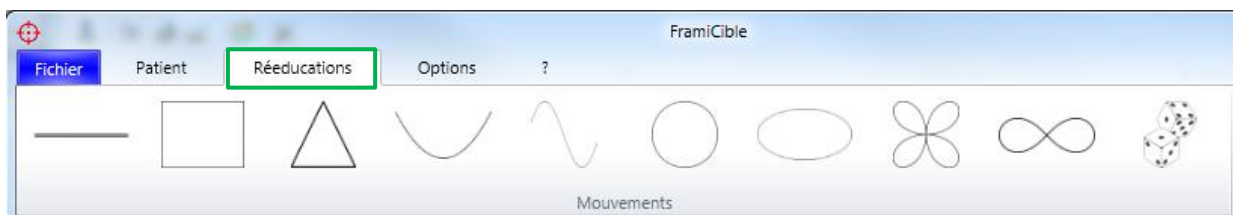


FIGURE 15 - REEDUCATIONS

En cliquant sur le menu « Rééducations », on peut accéder à la liste des figures de rééducation disponibles.

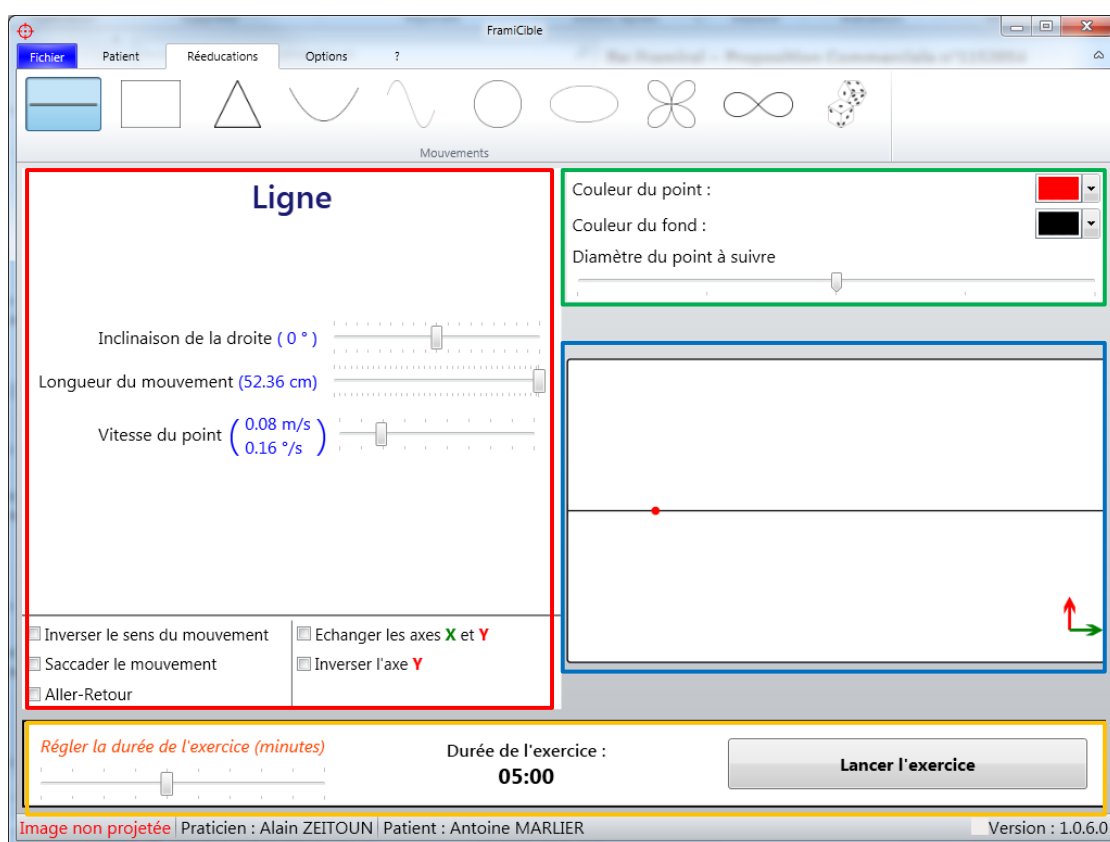


FIGURE 16 - LIGNE

Chaque exercice de rééducation possède ses réglages spécifiques (cadre rouge), les réglages communs (cadre vert), et l'aperçu de la figure ainsi générée (cadre bleu). Enfin, il suffit de démarrer l'exercice grâce au bouton « Lancer l'exercice » (cadre orange).

2. Autre

Pour nous envoyer un rapport, allez dans le menu « ? » puis dans le sous-menu « Envoyer un rapport de bug » (voir Figure 17).



AVD Envoyer un rapport de bug

Envoyer un rapport de bug

Sévérité du bug : Bug standard

Commentaires :
Le but est de nous décrire votre problème le mieux possible, pour que nous puissions vous aider.
Dans quelles conditions avez vous eu un bug ?
Comment pourrions nous le reproduire le plus simplement possible ?

Envoyer Annuler

FIGURE 17 - RAPPORT DE BUG

IV. MISE A JOUR

I. Rechercher et installer des mises à jour

Peu importe votre logiciel FRAMIRAL, il vous suffit d'aller dans le menu « ? », et de cliquer sur « Rechercher les mises à jour » (voir Figure 18, cadre rouge).


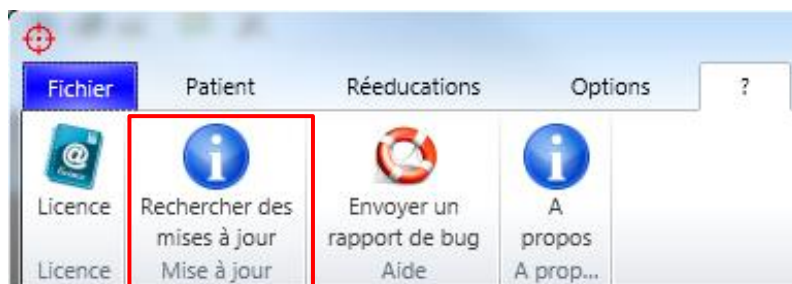


FIGURE 18 - RECHERCHER DES MISES A JOUR

Ensuite, regardez le composant de mise à jour en bas de la fenêtre du logiciel.


a) Cas 1 : Votre logiciel est à jour

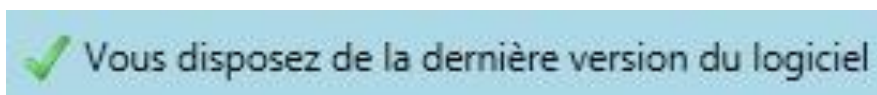

b) Cas 2 : Des mises à jour sont disponibles




Cliquez alors sur ce composant pour faire apparaître différents choix possibles :

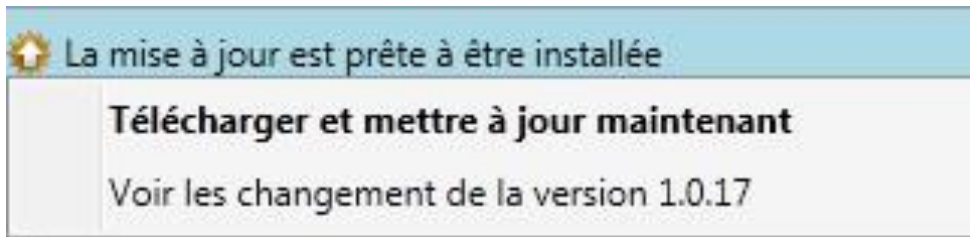

« **Télécharger et mettre à jour maintenant** » vous permet de télécharger et d'installer automatiquement la dernière version en date. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, ne touchez plus à rien, tout se fait automatiquement !

« **Voir les changements de la version XX.XX.XX** » vous permet de voir la liste des modifications apportées entre votre version et la version XX.XX.XX.

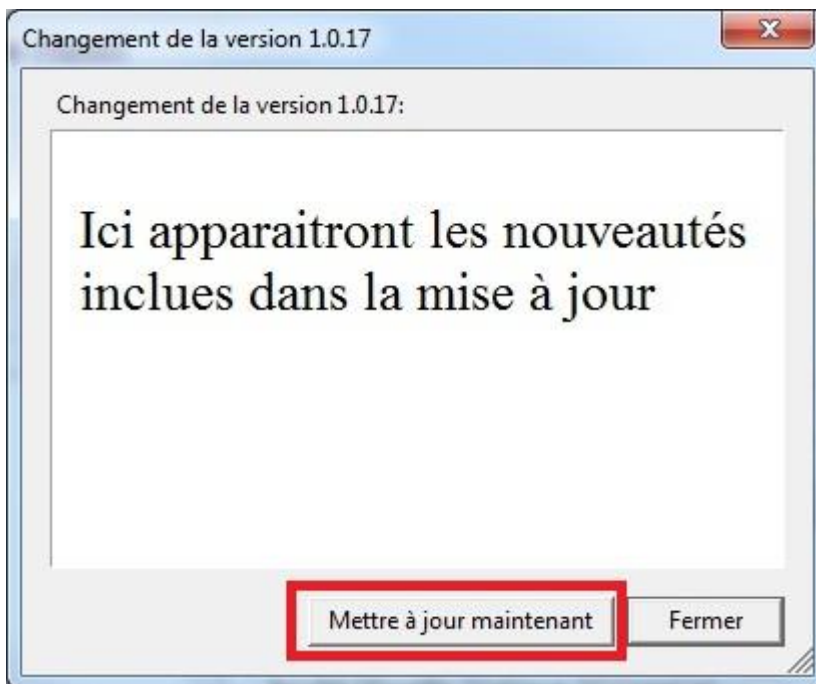

Vous avez juste à cliquer sur « Mettre à jour maintenant » pour que tout se fasse automatiquement !

c) Cas 3 : Il est impossible de chercher les mises à jour



Il peut être impossible de rechercher les mises à jour pour plusieurs raisons :

- Vous n'avez pas de connexion internet (vous pouvez vérifier en lançant une page internet)
- Vous avez une connexion internet, mais une sécurité (pare-feu, antivirus ...) très puissante qui empêche la mise à jour.

Table des Illustrations

Figure 1 - Icône FramiCible dans FramiGest	4
Figure 2 - Icône FramiCible sur le bureau	4
Figure 3 - Paramètres	5
Figure 4 - Général	5
Figure 5 - Projecteur	6
Figure 6 - Calibration	7
Figure 7 - Fenêtre "E"	7
Figure 8 - Configuration d'exercice	8
Figure 9 - Réseau	8
Figure 10 - Menu "?"	9
Figure 11 - Clé de licence	9
Figure 12 - Icône FramiCible sous FramiGest	10
Figure 13 - Icône FramiCible sur le bureau	10
Figure 14 – FramiCible – Onglet patient	11
Figure 15 - Rééducations	12
Figure 16 - Ligne	12
Figure 17 - Rapport de bug	13
Figure 18 - Rechercher des mises à jour	14

FRAMIRAL®



FRAMIRAL

107, avenue Jean Maubert

06130 GRASSE

FRANCE

Tél : +33 422 480 107

Fax : +33 956 372 472

Email : contact@framiral.fr